

Produktinformation

CICATREX Kompressionshandschuh



Art-Nr.: 17.07.01.0001 / Marke: [Thuasne Deutschland](#)



62,90EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 4,99EUR DHL-Versand

 Lieferzeit: 2 bis 6 Werktage; Sonderanfertigung bis zu 15 Werktagen

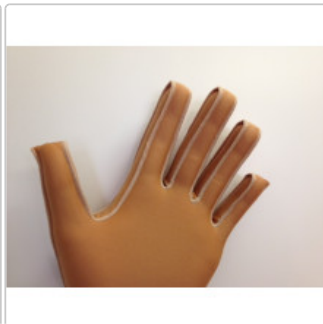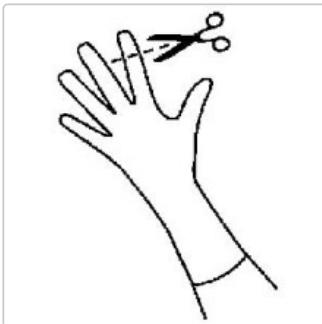

Hilfsmittel/Artikelnummer: 3448-02

Cicatrex Kompressions-Handschuh

Produktinformation

Der Cicatrex-Interimshandschuh ist ein weicher Kompressionshandschuh aus einem Zweizuggestrick mit hohem Tragekomfort.

Er kann **durch Zuschnitt** individuell angepasst werden.

Das heißt, man kann die Finger auf jede Länge kürzen und es entstehen dabei **keine** Laufmaschen!

Indikation

- Narbenkompression zur Prophylaxe und Therapie von Narbenhypertrophie, Keloiden (überschießende Narben) und Narbenkontrakturen (schrumpfende Narben)
- Bei thermischen, chemischen oder elektrischen Brandwunden
- Nach Hauttransplantation
- Ödemtherapie und -prophylaxe (Wasseransammlung im Gewebe) nach operativ versorgter distaler Radiusfraktur (Bruch der Speiche)
- Ödemtherapie und -prophylaxe (Wasseransammlung im Gewebe) bei der Nachbehandlung sonstiger Frakturen (Knochenbruch) im Handbereich
- Postoperativ nach Weichteileingriffen im Bereich von Hand und distalem (körperfernem) Unterarm

Wirkungsweise

- Verminderung der Durchblutung der Narbe
- Parallele Anordnung der Kollagenfasern
- Anti-inflammatorische Wirkung
- Linderung des Juckreizes
- Verminderung der Ödemneigung
- Beschleunigung des Abbaus von Ödemen

Einsatzbereich

Therapeutisch und prophylaktisch bei den genannten Indikationen

Eigenschaften

- Handschuh mit geschlossenen Fingern
- Schnittfestes Gestrick
- Individuelle Anpassung der Finger- und Stulpenlänge durch Zuschnitt



Anwendungshinweise

- Den Handschuh nicht mit Gewalt anziehen
- Beschädigungen durch Schmuck oder scharfe Nägel vermeiden
- Auf faltenlosen Sitz des Handschuhs achten


Pflegehinweise

- Handwäsche bei maximal 30° C
- Feinwaschmittel, aber keinen Weichspüler verwenden
- Kein Bleichmittel benutzen
- Handschuh nicht auswringen, sondern zwischen einem Handtuch ausdrücken
- Keinen Trockner benutzen und keiner direkten Hitzeinstrahlung aussetzen, z.B. Heizung, pralle Sonne

Produktinformation

Größentabelle

Größe Handumfang in cm **1** 13,0-14,5 **2** 15,0-16,5 **3** 17,0-18,5 **4** 19,0-20,5 **5** 21,0-22,5 **6** 23,0-24,5 **7** 25,0-26,5 **8** 27,0-28,5

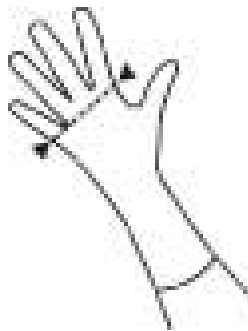

verfügbare Optionen

Stulpenlänge

5 cm

15cm (+4,99EUR)

Farbe

haut

schwarz

Größe

1

2

3

4

5

6

7

8
