


Produktinformation

Anziehhilfe, Ausziehhilfe Juzo Easy Fit für Kompressionsstrümpfe mit und ohne Spitze

Art-Nr.: 02.40.01.3025 / Marke: [Juzo](#)

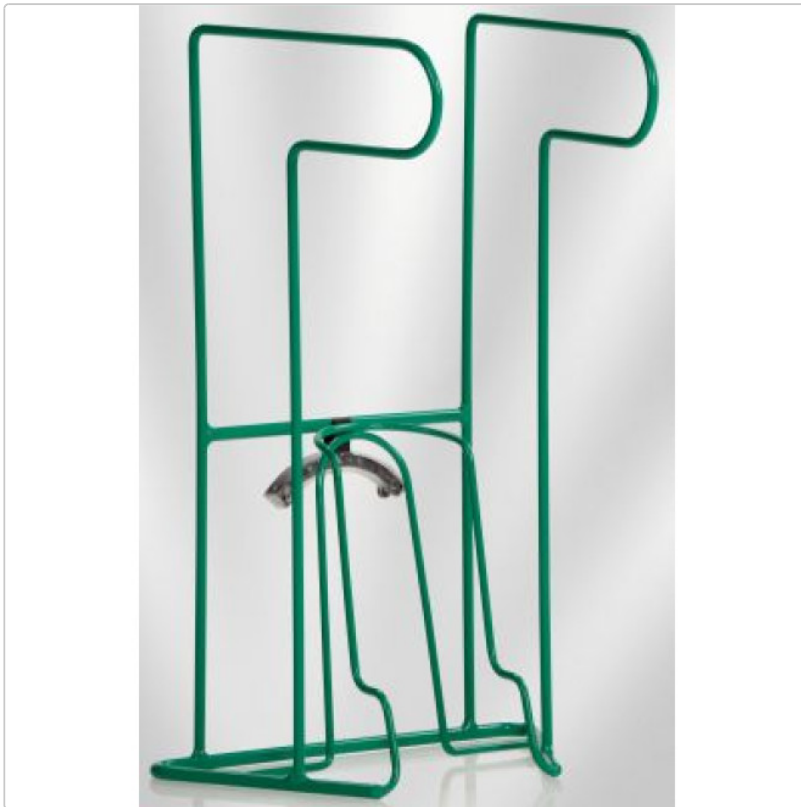

114,95EUR / Stück

Grundpreis: 114,95EUR / Stück
inkl. 19% USt. inkl. Versand

 Lieferzeit: 2 bis 6 Werktage; Sonderanfertigung bis zu 15 Werktagen

Hilfsmittel/Artikelnummer: 02.40.01.3025

Juzo® Easy Fit Die neue An- und Ausziehhilfe für Kompressionsstrümpfe

Die Juzo® Easy Fit ermöglicht müheloses An- und wieder Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen. Das schont die Haut des Patienten und das Gestrick des Kompressionsstrumpfes. Durch den komfortablen langen und gebogenen Griff ist Juzo® Easy Fit zudem sehr leicht zu handhaben, ohne anstrengendes Bücken.

Hilfe beim Anziehen

Zum Anziehen stülpt der Patient den medizinischen Kompressionsstrumpf von Juzo® über den Einstiegsschaft, bis die Fersennaht zu sehen ist. Nun schlüpft er in den Strumpf und zieht mit der Easy Fit den Kompressionsstrumpf bis zum Knie

Produktinformation

nach oben. Danach streicht der Patient den Kompressionsstrumpf wie gewohnt mit Gummihandschuhen in Position.

Ausziehen leicht gemacht

Der Unterschied der Juzo® Easy Fit zu herkömmlichen Anziehhilfen wird beim **Ausziehen** deutlich. Dazu steigt der Patient wieder in die Juzo® Easy Fit. Anschließend stülpt er den Rand des Kompressionsstrumpfes über den Einstiegsschaft und klappt das neuartige Strumpfhaltelement nach oben. Nun kann er ganz leicht aus dem Kompressionsstrumpf aussteigen. Mit etwas Übung ist das An- und Ausziehen des medizinischen Kompressionsstrumpfes mit Hilfe der neuen Juzo® Easy Fit kinderleicht.

Jetzt auch für größere Beinumfang: Juzo® Easy Fit XL

Um auch Patienten mit größeren Beinumfängen das Handling zu erleichtern, ist eine zusätzliche Version - Juzo® Easy Fit XL - erhältlich. Der verbreiterte Einstiegsschaft ist für einen Fesselumfang von 26 cm und größer geeignet.

verfügbare Optionen

Größe

M

XL
